



LAGERUNG MEDITROKARTEN

Stand: 1.1.2019

Für die Lagerung der Medtrokarten gelten folgende Richtlinien:

Die Medtrokarten sollten generell bei 2-8°C gelagert werden (siehe auch Gebrauchsanweisung im Karton).

Eine Lagerung bei Raumtemperatur ($21^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$) bis zu 2 Wochen ist zulässig.

Bei Temperaturbelastungen bis zu 30°C sollte die Lagerungs- bzw. Transportzeit unter 5 Tagen liegen.

Bei Temperaturbelastungen bis zu 35°C sollte die Lagerungs-bzw. Transportzeit unter 3 Tagen liegen.

Ein einmaliges Einfrieren und Wiederauftauen der Medtrokarte hat keinen meßbaren Einfluß auf die Qualität der Medtrokarten-Seren.